

DURICO

ZAMIENNIKI DO VIDEOPRINTERÓW




WIEMY JAK DRUKOWAĆ TANIEJ BEZ OBAW O UTRATĘ JAKOŚCI.

Tajemnica tkwi w ustawieniach Twojego videoprintera. Kupując zamienniki dla filmów Mitsubishi K-61 i K-65, pamiętaj o **jednorazowej zmianie ustawień** na urządzeniu USG. Sprawiaj swoim pacjentkom jeszcze więcej radości wysokiej jakości wydrukami jednocześnie oszczędzając pieniądze. Sprawdź nazwę modelu swojego videoprintera a następnie zmień ustawienia według poniższej instrukcji.




DRUKUJ TANIEJ BEZ UTRATY JAKOŚCI

MODEL P91

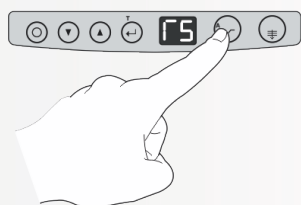

Gamę krzywych można wybrać naciskając przycisk gamy (G). Z każdym naciśnięciem tego przycisku krzywa gamy oraz wyświetlane wartości zostają zmienione. Po wybraniu odpowiedniej liczby dla krzywej gamy (1-5) naciśnij przycisk „Set” aby zapisać ustawienia.


MODEL P93

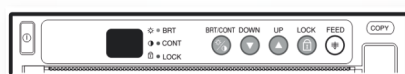

Aby ustawić kontrast drukarki naciśnij dwukrotnie przycisk BRT/CONT. Po zaświeceniu się diody CONT, ustaw kontrast (-19 do +19) używając przycisków „UP” lub „DOWN”.

Naciśnij ponownie przycisk BRT/CONT aby zapisać ustawienia. Ustawienia zostaną zapisane nawet jeśli drukarka będzie wyłączona.

MODEL P95

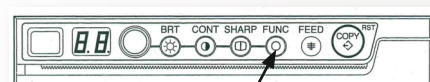

Naciśnij przycisk „FUNC”.

Ustawienia krzywej gamy pojawią się na wyświetlaczu. Istnieje pięć ustawień tej funkcji. 1 jest najciemniejszym ustawieniem, podczas gdy 5 jest najjaśniejszym ustawieniem.

Używając pokrętła regulacji wybierz odpowiednie ustawienie (1-5). Następnie naciśnij przycisk „FUNC” 3 razy aż na wyświetlaczu pojawi się „00”. Wybrana wartość zostanie zastosowana i zapisana.

Potrzebujesz więcej informacji?

ZADZWOŃ DO NAS, tel. 62 501 35 50