

# ODKRYJ NOWĄ SYNERGIĘ DLA TWOJEJ CENTRALNEJ STERYLIZATORNI 5 ENZYMÓW W JEDNYM WYJĄTKOWYM PRODUKCIE

## Aniosyme Synergy 5

### UNIKALNY 5-ENZYMATYCZNY PREPARAT MYJĄCY DO MANUALNEGO I AUTOMATYCZNEGO REPROCESOWANIA NARZĘDZI

Aniosyme Synergy 5 to pierwszy, pięcioenzymatyczny preparat myjący o szerokim zastosowaniu. Posiada doskonałe właściwości myjące zarówno w przypadku manualnego, jak i maszynowego mycia narzędzi, umożliwiając stosowanie jednego produktu w Centralnej Sterylizatorni:

Aniosyme Synergy 5:

- **UNIKALNY** - 5-enzymatyczny preparat myjący o szerokim spektrum działania
- **PEWNY** - szybkie działanie w myjniach-dezynfektorach, niezależnie od jakości użytej wody - już w 5 minut
- **SYNERGICZNY** - pierwszy preparat do manualnego i automatycznego mycia narzędzi w Centralnej Sterylizatorni



# Aniosyme Synergy 5

Unikalny 5-enzymatyczny preparat myjący do manualnego i automatycznego reprocessowania narzędzi



**Aniosyme Synergy 5**  
Manualne przygotowanie  
4 x 5 l kanister + pompka 25 ml  
Kod produktu: 3091540



**Aniosyme Synergy 5**  
Maszynowe przygotowanie  
2 x 5 l kanister  
Kod produktu: 3091520

## SKUTECZNY

Udowodnione działanie już po upływie 5 minut, w połączeniu z doskonałą kompatybilnością materiałową.

## ENZYMATYCZNY

Usuwa wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia organiczne dzięki specjalnie opracowanej formule zawierającej pięć enzymów.

## PEWNY

Niskie stężenia roztworu wynoszące od 0,1% do 0,5% zapewniają doskonałą skuteczność mycia.

## WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Gęstość 20°C 1,10 g/ml
- Wartość pH\* (koncentrat) 20°C 7,89
- Wartość pH\* (roztwór, 1 - 5 ml/l) 20°C 6,89 - 7,29
- Przewodność 20°C 0,08 - 0,33 mS/cm  
(roztwór, 1 - 5 ml/l w wodzie demineralizowanej)

\*pomiarów wartości pH w warunkach eksploatacji należy zawsze dokonywać przy użyciu pehametru z kompensacją temperatury.

## DOSTĘPNE OPAKOWANIA

REKOMANDOWANE DO STOSOWANIA MANUALNEGO I W MYJNI ULTRADŹWIĘKOWEJ	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Aniosyme Synergy 5	12 x 1 l butelka	3100460
Aniosyme Synergy 5	4 x 5 l kanister + pompka 25 ml	3091540

REKOMENDOWANE DO STOSOWANIA W MYJNI-DEZYNFEKTORZE	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
Aniosyme Synergy 5	2 x 5 l kanister	3091520
Aniosyme Synergy 5	1 x 10 l kanister	3094300



**LABORATOIRES ANIOS**  
1, Rue de l'Espoir  
59260 Lezennes  
France

Dystrybutor:  
**ECOLAB SP. Z O.O.**  
ul. Opolska 114  
31-323 Kraków  
Polska

## OBSZAR ZASTOSOWAŃ

5-enzymatyczny preparat do mycia narzędzi. Mycie sprzętu chirurgicznego i medycznego, endoskopów i wyrobów medycznych poprzez zanurzenie, w myjkach ultradźwiękowych, w myjniach-dezynfektorach i myjniach tunelowych.

## SPOSÓB POSTĘPOWANIA

### Manulne przygotowanie

- Koncentrat do zastosowania profesjonalnego
- Stosować w stężeniu od 0,5% do 2%
- Skuteczny w ciągu 5 minut
- Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. W razie konieczności użyć szczotki. Dokładnie spłukać
- Maksymalna temperatura: 35°C

### Maszynowe przygotowanie

- Koncentrat do zastosowania profesjonalnego
- Stosować w stężeniu od 0,1% do 0,5%
- Skuteczny w ciągu 5 minut
- Należy dostosować stężenie, czas działania i temperaturę wody do poziomu zabrudzenia. Dokładnie spłukać
- Maksymalna temperatura: 60°C

## SKŁAD

Niejonowe i kationowe środki powierzchniowo-czynne, związki kompleksujące, stabilizator, enzymatyczne substancje pomocnicze.

## PRZECHOWYWANIE

Niebezpieczeństwo - należy przestrzegać środków ostrożności (sporządzonych na podstawie obowiązujących przepisów UE w zakresie klasyfikacji i oznakowania produktów chemicznych). Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

## DOKUMENTACJA

Dokumentacja dostępna na życzenie.

## WYROBÓW MEDYCZNYCH UŻYWAJ BEZPIECZNIE

Należy zapoznać się z informacją umieszczoną na etykiecie produktu.



WYŁĄCZNIE DO ZASTOSOWANIA PROFESJONALNEGO.

